

機械器具 75 脱疾治療用器具  
 一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

## 骨盤底サポーター

### 【警告】

- 使用方法** 1、本品は着用している間の症状を緩和するものです。治療には医師への相談及び骨盤底筋体操が必要です。
- 2、就寝時は着用しないでください。就寝時の着用は体表面のリンパの流れを悪くし、体に悪影響を与えます。

### 【形状・構造及び原理等】

① 股間部：布の張力により骨盤底を持ち上げて膣を閉じ、下垂した臓器を元の位置に保ちます。

② 着脱部：持ち上げる力を腰ベルト部へ伝え固定します。

③ 腰ベルト部：伝わった力を腰回りの摩擦力で支えます。

通気性の良いメッシュ素材(ナイロン・ポリウレタン)で構成され、

腰囲（右図：腰骨の前出っ張り部分で測った骨盤の周長）

後股上（右図：骨盤上端(標準的なショーツのゴムライン)から

肛門までの長さ）

により、下表の各サイズがあります。

適用範囲		腰囲 (cm)		
		75～85	85～95	95～105
後股上 (cm)	24 以上	<b>80N</b>	<b>90N</b>	<b>100N</b>
	24 未満	<b>80K</b>	<b>90K</b>	

**【使用目的】** 骨盤臓器脱の症状を有する患者が、下着の上に重ねて履くことにより、下垂した臓器を正常な位置に保持する。

### 【使用方法等】

下着の上に重ねて履き、着脱部を引き上げて左右の面ファスナー(マジックテープ)で留めて用いる。

**イラスト付き説明書を必ず読んでご使用ください。**

### 【使用上の注意】

- 1、着用の際は、腰回りを強く締めすぎないようにご注意ください。
  - 1、腰痛を生じた際は着用を中断し、良くなってから着用してください。
  - 2、洗濯時は面ファスナーを留め、手洗いし、タオル等で水気をきって陰干しして下さい。
- 脱水機・高温・紫外線はゴム部の寿命を縮めます。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1、保管方法：直射日光を避け室内で保管してください。
- 2、耐用期間：ゴムが伸びてしまうと製品寿命ですので買い替えが必要です。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



製造販売業者  
**合同会社アダム医健**  
 Tel: 03-3940-5502

